

# Silikonpflaster

Durch die neue Silikon-Klebertechnologie haftet dieses Spezialpflaster ohne selbst zu kleben. Das „berührungslose“ Kleben ermöglicht die Anwendung bei hochsensibler Haut (wie z. B. Kortisonhaut, Babyhaut).

Geeignet zur Anwendung bei frischen Narben und primären Wunden. Minimiert die Narbenbildung und beschleunigt den Heilungsprozess. Auch bei blutenden Wunden kann das Pflaster verwendet werden, hier allerdings unter Gebrauch einer Wundauflage. Die Silikonhaftung ermöglicht ein mehrfaches Neuanlegen des Pflasterstrips, sowie einen festen Halt auch unter Wasser.

**Größe 2,5cm x 1,5m**

Erhältlich in den Farben beige und blau.



**+++ kein Ziehen beim Entfernen +++ haftet ohne selbst zu kleben +++ minimiert die Narbenbildung +++ wasserfest und schwimm-/duschkfest +++ auch für hochsensible Haut +++**

**WELLNEUSS**  
GmbH & Co. KG

**Vertrieb: Wellneuss GmbH & Co. KG**  
Kieselstraße 7 • 41472 Neuss  
Tel.: 02131/1249200 • Fax: 02131/1249277  
[www.wellneuss.de](http://www.wellneuss.de) • [info@wellneuss.de](mailto:info@wellneuss.de)

# Silikonpflaster

---

## **Anwendungshinweise:**

Nicht steril, bei offenen Wunden eine Wundauflage benutzen. Vor dem Gebrauch darauf achten die Wunde/Narbe zu reinigen – Pflaster haftet am besten auf trockener Haut. Bei Narben das Pflaster (ohne Wundauflage) direkt auf die entsprechende Stelle legen. Die Narbe muss vollständig mit dem Pflaster bedeckt sein. Positive Ergebnisse erzielen Sie ab einer Mindesttragedauer von 3 – 4 Wochen!

